

Fitform Handbedienung

Fußstütze **'EIN'**

Fußstütze **'AUS'**

Aufstehhilfe **'Aufstehen'**
(Sessel fährt hoch)

Kippen: Sitzfläche und
Rückenlehne nach Hinten

Und: Aufstehhilfe **'Sich
setzen'** (Sessel fährt in
Sitzposition)

Rückenlehne **'nach Vorne'**

Rückenlehne **'nach Hinten'**

Tastatursperre
(falls vorhanden)

Taste drücken, wenn die Kontroll-
Leuchte blinkt ist die Bedienung
blockiert. Auf's neue eindrücken
(bis die Kontroll-Leuchte nicht
mehr brennt) und die Bedienung
ist wieder aktiviert.

*fit***FORM**

Handbedienung FITFORM

Die Erklärung der Tasten finden Sie in der obigen Abbildung. Im Allgemeinen gilt: Die jeweils rechte Taste führt die Funktion aus, welche mit der zugehörigen linken Taste wieder zurückgeführt wird. Beispiel: mit der Taste oben rechts wird die Fußstütze ausgefahren, mit der Taste oben links wird diese wieder eingefahren.

Wenn der Sessel in der Aufstehposition steht (also hoch) ist es nicht möglich die Fußstütze hoch zu fahren. Wenn der Fußstütze nicht auskommt, mit der roten Taste der Sitz bitte ein bisschen nach hinten kippen. Falls die Handbedienung nicht funktioniert, bitte zuerst nachschauen ob der Stecker in der Steckdose ist und ob der Sessel in die Neutralposition steht.



Ihr **Wohlbefinden** ist unser Anliegen!

fitFORM
member of Wellco[®]